



ロータスクイーン洗浄マニュアル

”ロータスクイーン”とは？
特許取得のナノテクノロジーで血液やタンパク
脂肪などの汚れを超微細に分散させる
画期的な中性洗剤です。

衛生管理のスカイレインボー



用途

希釈率
コスト表

ノンクラスプデンチャー
義歯

器具

バキューム
パイプ

床
他

タオル
他

テーブル
他

洗浄方法

原液 専用ムース 容器使用

専用ムース容器 60cc に
本剤を原液で入れる
60cc 容器 = 80 回分



原液で、3 回プッシュ(ムース) →ソフトなブラシを使い擦り洗い →水でよく濯ぐ →仕上がり

予備洗浄 5倍希釈

予備洗浄 400cc 辺り
192 円~240 円
浸漬洗浄 1L 辺り
15 円~24 円
超音波洗浄 1L 辺り
5 円~6 円



予備洗浄の場合



浸漬洗浄の場合



超音波洗浄の場合

専用スプレー容器にて原液~5 倍希釈 100 倍~200 倍希釈 300 倍~500 倍希釈
上記いづれの洗浄方法でも、洗浄後は、よく水で濯ぎ、よく乾燥させて 滅菌

100 倍 希釈

水 200cc に本剤 2cc
例) 200cc の水に本剤を
スプレー 1 回散布して軽く
かけ混ぜる
1 回辺り = 5 円~6 円



100 倍希釈 200cc ~ 300cc 吸引し 翌朝 水で十分に吸わせる

30 倍 希釈

400cc 専用スプレーに
約 15cc 本剤を入れる
残りは水を満タンに入れる

400cc = 3 2 円



ドライフロアの洗浄



ウェットフロアの洗浄



食器・調理器具・シンク・排水溝の洗浄



(ロータスクイーンをスプレーで散布)

(専用ムース容器で程よい泡で濯ぎも簡単、洗い流すと同時に
排水溝の嫌なニオイを解消します)

2000 倍 希釈

水 40L に本剤 20cc を
入れる

1L 辺り = 1 円



タオル・白衣等の洗浄・洗濯

(ニオイの元の油脂をナノレベルで分散)

※市販の柔軟剤と混ぜて使用も可能



浴槽・エアコン等の洗浄

(ニオイの元の油脂をナノレベルで分散)



30 倍 希釈

400cc 専用スプレーに
約 15cc 本剤を入れる
残りは水を満タンに入れる

400cc = 3 2 円



テーブル・デスク等の洗浄



窓ガラス等の洗浄



待合室等の椅子等の洗浄



壁等の洗浄

洗浄・清掃をロータスクイーン一つにすると、今まで落とせなかった目に見えない汚れが落ち、大幅な経費削減ができます！