



# フィリオ30 (サーティ) 除菌マニュアル

## フィリオ30 サーティ

衛生管理のスカイレインボー



用途

希釈率

除菌方法

訪問診療  
器具の清拭

原液使用  
血液付着した場合  
高いリスクの場合

5倍希釈使用  
日常使用濃度



直接スプレー噴霧し拭き取る



又は、ティシュペーパー等に含ませて拭き取る




双眼ルーペ  
清拭

原液使用  
血液付着した場合  
高いリスクの場合

5倍希釈使用  
日常使用濃度



ティシュペーパーに含ませて、よく拭き取る ※双眼ルーペの場合 直接噴霧は避ける

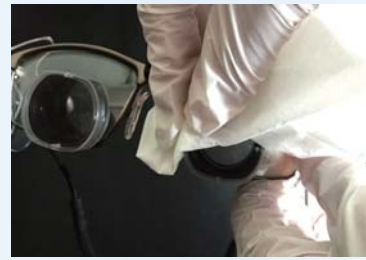

ハンドピース  
タービンの表面

原液使用  
血液付着した場合  
高いリスクの場合

5倍希釈使用  
日常使用濃度



ティシュペーパーに含ませて、よく拭き取る ※直接噴霧は避ける



周辺機器の清拭  
ユニット

原液使用  
血液付着した場合  
高いリスクの場合

5倍希釈使用  
日常使用濃度


室内空間除菌消臭=5~10倍希釈



直接スプレー噴霧し、ペーパータオル等で拭き取る

印象物の除菌


原液使用

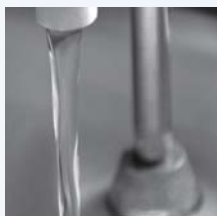

流水後



まんべんなくスプレー噴霧

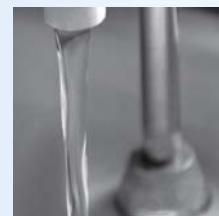

軽く水洗

テーブル他

原液使用  
血液付着した場合  
高いリスクの場合

5倍希釈使用  
日常使用濃度



テーブル・デスク等の清拭



待合室等の椅子等の除菌消臭



白衣の除菌消臭