

<ハンドピース、エアータービン表面の洗浄除菌について>

「フィリオ30」と「アルコールワッテ」を併用した複合的な使用方法

<アルコールの短所を補い長所を活かす>

短所) アルコールはタンパク凝固作用がある。⇒前処理に 洗浄を要する

長所) アルコールは速乾性があり、乾燥が早くなる為、水分等残存させない利点がある。

<フィリオ30 (サーティィ)>

長所) 弱酸性の液性で、早く細菌やウイルスを除去できる

フィリオ30 ※原液 対芽胞 10ml中 菌数:830万個

※10秒 <1 (<1は菌が検出されなかった事を示す 一第三者検査機関より一

長所) 除タンパク効果がある 一第三者検査機関による試験結果より一

短所) 速乾性が無い為、乾燥が遅い

フィリオ30をティッシュペーパー等に含ませて



表面外側のみ拭き取ります



アルコールワッテで拭き取ります



<何故?フィリオ30をティッシュペーパーで拭き取るのか?>

タービンやハンドピース等の内部に水が入らないようにする事と

フィリオ30は、繊維のない ティッシュペーパーの方が拭き取りやすい為です。

又、拭き取ることで 有機汚染物を除去する効果も早くなる為です。

<何故?アルコールワッテを使用するのか?>

器具を傷めない、又 腐食させない為にも、速やかに乾燥させる事と

オートクレーブ滅菌も、水分残さず 十分な乾燥させた状態がベストと考えます。

<オートクレーブ滅菌は?>ガイドライン通り 行ってください。

<注意する点>

フィリオ30とアルコールは混ぜないで使ってください。

フィリオ30でタービンやハンドピースを浸漬しないでください。

必ず、ティッシュペーパーに拭きつけ 表面のみ拭きとってください。