

<フィリオ 30 (サ-ティ-) とロータスクイーン 双眼ルーペの清拭について>

双眼ルーペは一般的には以下の注意があります。


- ① 浸漬洗浄は不可
- ② 流水洗浄不可
- ③ アルコールや塩素系漂白剤の使用不可又は困難



材質を傷めず、細菌やウイルスを素早く除去し、タンパク汚れ、皮脂の汚れ、の除去が速やかに出来るように、示唆した使用方法です

- ① ロータスクイーンを一拭きしたティシュペーパーに
- ② 各パーツを、洗浄液が残らないようにきれいに拭き取る

“フィリオ 30 原液” を拭きかけ

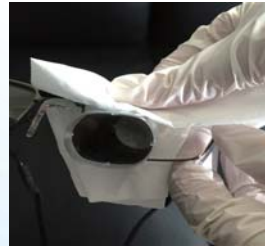

※直接スプレーはせず、ティシュペーパーに含んでから 拭き取ってください

Q、何故、ティシュペーパーが有効か？

- 繊維がある不織布に比べ、上記のシステムの場合に関してはティシュペーパーの方が拭き取りしやすく、コストも安価で済むとは思いますが。
- しっかり、拭き取るには、ティシュペーパーは、面積が広い為、一度拭いた個所を避けて、拭き取る事ができます。せっかく汚れを拭き取っても、同じ場所で拭きとってしまったら汚れを、再び付着させてしまいます。そういった面からも拭きとれる面積が広いティシュペーパーを使用する事が望ましいと考えます。

Q、フィリオ 30 だけでも、良いのでは？

- 軽度な汚れであれば、フィリオ 30 だけの拭き取りでもいいと思いますが、汚れが強い時には ロータスクイーンを混合した方がよいか、思います。いずれにしても、拭き取りは簡単ですが しっかりきれいに拭き取る事が POINT だと思います。

Q、常に、“汚れを落とす” クリーニングと “細菌やウイルスを除去し” 感染予防”
同時に作業したいので 予め、フィリオ 30 にロータスクイーンを少量混ぜたスプレーで使いたいのですが？

- それでも全く問題ありません。混合した液は相性よく W 効果を発揮させますので。但し、普通の眼鏡などは直接スプレー噴霧して水洗いでいいのですが、双眼ルーペは必ずティシュペーパーに含ませてから、よく拭き取りしてください。