


器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN31776000

スーパーオーラルミラー / 3枚組セット

【形状・構造及び原理】

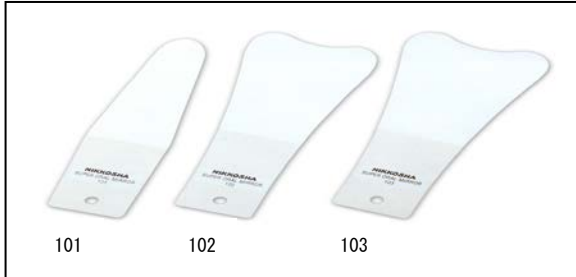

[原材料]: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

[使用目的]

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものを言う。

[効果]

本品は1形態を有する口腔内検診及び写真撮影用補助器で、本形態を使用することにより容易に口腔内検診及び写真撮影することが可能である。

【使用方法等】

本品を口腔内に挿入し、鏡面側に検診及び撮影部位が写る位置で角度等を調節し、口腔内検診及び撮影を行なう。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ① 本品は口腔内検診及び写真撮影補助器具です。**口腔内挿入時は口角部損傷に十分注意すること。直接火炎を当てない。**
- ② 本品は長期間使用により、鏡面側に傷が付くことが予想されますのでその際は適時交換すること。
- ③ 本品は、使用前に傷・バリ等がないことを確認すること。
- ④ **本品はステンレス製で歯科用消毒は可能ですが、長時間薬液中に浸漬させない事。オートクレーブ・EOGの使用は可能。次の薬液消毒剤は金属腐食を起こす恐れがあります使用しない事。超酸性水・次亜塩素酸Na・塩化ベンザルコニウム・ポビドンヨード・ホルマリン・フェノール・グルコン酸クロルヘキシジン・止血剤・フッ化ジアンミン酸等。**

★★ 弊社推奨複合消毒法、

ステップ1. (菌やウイルスの除去と一定のタンパク除去)

高濃度次亜塩素酸弱酸性水(フィリオ30)にて、スプレークリーニング1分間放置2回洗い流水洗浄。

ステップ2. (十分な洗浄とタンパク除去)

オキシドール系弱アルカリ洗浄剤(洗浄ルネサンス)にて200倍希釈、10分浸漬後流水洗浄。

ステップ3. 化学的殺菌・消毒剤(グルタル製剤)等を含む

高水準消毒薬で浸漬洗浄・流水洗浄・拭き取り乾燥を行う。本品の薬液消毒後は、必ず鏡面の表裏面を『温かいお湯』下で付着した薬液を十分洗い流してください。

なお、『乾燥ムラ』を防ぐため水切りを十分行ない滅菌袋に入れ滅菌処理を行なうこと。

- ⑤ 本品は、超音波洗浄はできません十分注意すること。
- ⑥ 強アルカリ・強酸性洗剤等の消毒剤は、器具を腐食させる恐れがあります使用を避けること。また、金属タワシ・クレンザー(磨き粉)等は、器具の表面が損傷するため汚物除去及び洗浄時に使用しないこと。

⑦オートクレーブ滅菌器等の高圧蒸気滅菌器は以下に留意する事。

- 乾燥温度及びチャンパー内温度に注意する。
- チャンパー内が高温となる恐れがある場合には予熱乾燥を行う。高温の乾燥は器具の変質又は変色・劣化・破損等を起こす事がある。ヒーター付近に本品を置かない。
- 長期間の反復オートクレーブ滅菌器等の高圧蒸気滅菌器により本品鏡表面の光沢を失うことが有る。

【使用の注意】

1) 使用注意

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- ② 使用前に必ず、洗浄・滅菌(保守・点検に係る事項参照)をすること。**洗浄・滅菌は、[使用方法に関連する使用上の注意]④ & ステップ1～3&⑤⑥⑦を参照のこと。**
- ③ 使用目的(手術・処置・技工を含む医療行為)以外は使用しないこと。また、破折・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。
- ④ 使用後は器具に付着している血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに洗浄液等に浸漬すること。

2) 重要な基本的注意

本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、速やかに使用を中止し医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期限等】

[貯蔵・保管方法]

- ① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- ② 適切な保管・管理をすること。

[使用期限等]

本品は、使用有効期限等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため安全管理上新しい物と適時交換すること。

【保守・点検に係る事項】

使用(滅菌)前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: 小野島製作所

電話番号: 03-3986-5957

FAX番号: 03-3980-5147

製造業者: 小野島製作所

住所: 〒170-0011

東京都豊島区池袋本町3-19-12

【販売業者の名称及び住所等】

販売業者: 株式会社 日本歯科工業社

住所: 〒110-8530

東京都台東区上野5-12-8.

http://www.kk-nikkosha.com

電話番号: 03-3836-2191

FAX番号: 03-3836-2199