

## フィリオ 30 (サーティ) よくある質問

### Q:フィリオ30のウイルス又は芽胞などエビデンス(試験)はありますか?


公的第三者検査機関を含め、ウイルスも細菌芽胞も試験報告書あります。  
エビデンスはフィリオ30の発売以来、最も大切にしてきた拘りの一つです。

・試験報告書必要な方は、skyrainbow3729@yahoo.co.jpまでご連絡ください。  
ギガファイル便にて後日送らせていただきます。

### Q:樹脂や、ゴム、ミラーなど材質に対して?



第三者検査機関による浸漬試験			
合成ゴム	○	ミラー	○
樹脂	○	レザー	○
プラスチック	○	スチールバー	△

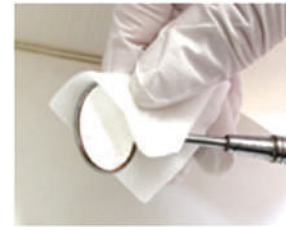

殆ど材質に優しく 安心して使用できますが、スチール製のバーは元々サビやすい材質で、熱で焦げたり等するためフィリオ30の5倍希釈で噴霧して、すぐに拭き取ってください(しっかり乾燥)。

### Q:本革の材質は、アルコールでは劣化してしまうと言われてますが、フィリオ30は?

A: 原液でも劣化しません(第三者機関試験済) 但し、必ずふき取りはしてください。

### Q:印象物の除菌は、原液でも変形の心配はありますか?

A: あらゆる印象物で、変形した報告は一度もございません。  
原液のフィリオ30スプレ噴霧 10秒~30秒放置して流水

### Q:フィリオ30を“浸漬除菌”で使用してますが、放置時間は?

浸漬(超音波含む)の場合、10倍希釈なら5分/20倍なら10分

〈液の交換の目安は?〉

1日~2日で交換してください。但し、液が汚染された場合は速やかに交換してください。



### Q:漂白性について



次亜塩素酸ナトリウムと比べ、漂白はしにくいですが、漂白性がないわけではないので一部の素材(例:タオルなど)で色落ちする場合があります。白衣などは、除菌消臭に使用できます、使用する場合は、

フィリオ30を5倍希釈以下でご使用ください。